


Test pilote – Guide rapide sur les boutons des fonctions

Premières étapes du test auditif pilote

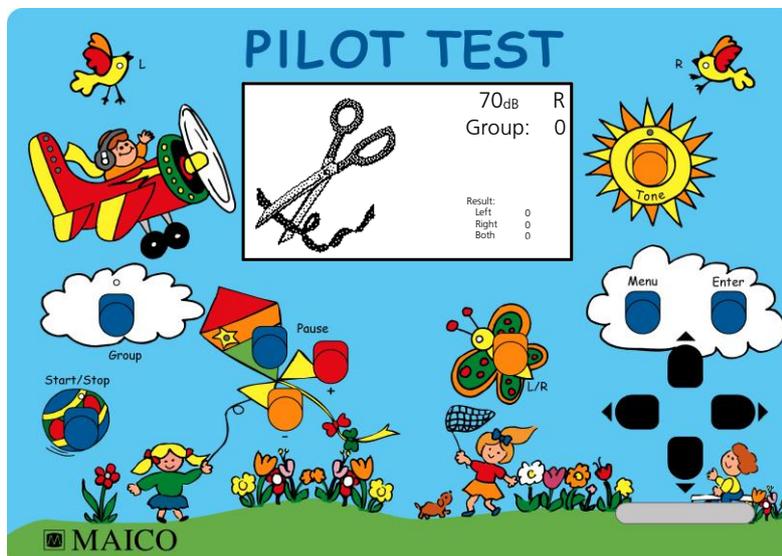

1. Préparation au test

- La pièce doit être silencieuse. La distance entre l'enfant et l'appareil doit être d'au moins 1 m.
- Allumez l'appareil à l'arrière.
- Positionnez le casque correctement : le côté bleu sur l'oreille gauche et le côté rouge sur l'oreille droite.
- Le mot test sous forme d'une image, l'oreille testée (R – droite (right), L – gauche (left) ou B – les deux (both)), le groupe sélectionné (Groupe 0-4), la langue du test vocal pilote (par ex. anglais) sont indiqués à l'écran.


2. Préparation (formation) du patient

- Sélectionnez le groupe 0 en appuyant sur le bouton Group (Groupe).
- Appuyez sur le bouton Start/Stop (Marche/Arrêt) pour démarrer le test. 11 phrases seront entendues par l'enfant à un niveau continu de 70 dB qui est affiché sur l'écran. L'image à l'écran change selon le mot du test.

3. Test des oreilles

- Sélectionnez l'oreille droite en appuyant sur le bouton L/R. R est indiqué à l'écran.
- Le niveau initial de 70 dB est indiqué et le premier mot testé est montré sous forme d'image.
- Appuyez sur le bouton Start/Stop (Marche/Arrêt) pour exécuter le test. « Test en Cours » apparaît à l'écran.
- Appuyez sur le bouton Enter (Entrée) si l'enfant signale son / sa compréhension et montre l'image correspondante sur le tableau des images. Le niveau est enregistré dans les résultats figurant à côté de l'oreille concernée. Le résultat apparaît à l'écran.
- Les résultats du test changent uniquement selon la confirmation.
- Appuyez sur le bouton Pause pour interrompre le test. Appuyez à nouveau sur le bouton Pause pour redémarrer le test.
- Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour passer ou répéter une phrase. Cette fonction n'est disponible que lorsque le test est en cours.

Premières étapes des tests de dépistage en sons purs

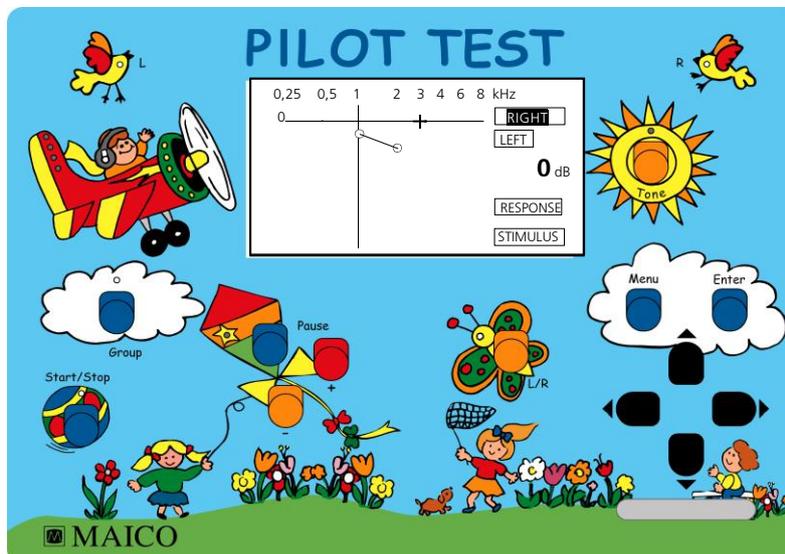

1. Préparation de la mesure

- La pièce doit être silencieuse. La distance entre l'enfant et l'appareil doit être d'au moins 1 m.
- Allumez l'appareil à l'arrière.
- Positionnez le casque correctement : le côté bleu sur l'oreille gauche et le côté rouge sur l'oreille droite.
- Appuyez sur le bouton Tonalité pour démarrer le test audiométrique. Un graphique s'affiche à l'écran.

2. Réalisation du test

- Sélectionnez l'oreille appropriée en appuyant sur le bouton L/R. L'oreille sélectionnée est marquée à l'écran.
- Le test commence à 1 kHz à un niveau sonore de 0 dB. La tonalité est indiquée sous forme de ligne de mire dans le tableau.
- Appuyez sur le bouton Stimulus pour présenter une tonalité. Le champ respectif est marqué à l'écran.
- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner les fréquences.
- Pour augmenter le niveau de test, appuyez sur le bouton ▼ ou sur le bouton ▲ pour diminuer le niveau de test.
- Une tonalité est présentée à l'enfant lorsque l'on appuie sur le bouton Stimulus. Le champ STIMULUS est marqué.
- Le champ de réponse est marqué à l'écran lorsque l'enfant manifeste son audition en appuyant sur l'interrupteur de réponse du patient.
- Confirmez son audition en appuyant sur le bouton Entrée. La tonalité de test entendue est enregistrée et représentée par un petit cercle O (oreille droite) ou une petite croix X (oreille gauche).
- Le curseur passe automatiquement à la fréquence suivante. Le test recommence à 0 dB.
- Procédez au test pour toutes les fréquences. Les points mesurés des fréquences sont automatiquement reliés par un trait.
- Après avoir terminé le test, le seuil d'audition est visible.