

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DEN DRUCKER



Diese Benutzerinformation muss vor Benutzung des easyTyp zur Kenntnis genommen werden. Lesen Sie dieses Dokument sorgfältig, um Testergebnisse von Ihrem easyTyp erfolgreich zu drucken.

Folgen Sie den unten aufgeführten Anweisungen, um mit dem drahtlosen Drucker zu drucken.

DRUCKVORGANG

1. Schalten Sie das easyTyp ein, indem Sie die rechte oder die linke Pfeiltaste drücken  .
2. Schalten Sie den Drucker ein, indem Sie die **Einschalttaste**  für zwei Sekunden gedrückt halten.
3. Warten Sie (bis zu 30 Sekunden), bis das Druckersymbol  in der rechten oberen Ecke des easyTyp-Bildschirms (neben dem Batteriesymbol) erscheint.
4. Druckerergebnisse werden sofort nach Drücken der Schaltfläche  gedruckt.

HINWEIS: Für den Fall, dass der Drucker vor der Durchführung eines Tests nicht eingeschaltet war, schalten Sie den Drucker in unmittelbarer Nähe des easyTyp ein. Sobald das Druckersymbol  angezeigt wird, drücken Sie die Schaltfläche  zum Drucken der Ergebnisse. Wird die Drucken-Schaltfläche vor Zustandekommen einer Verbindung zwischen easyTyp und Drucker gedrückt, so erscheint der folgende Fehler.

Druckfehler

Prüfen:
Strom
Verbindung
Setup

Wenn diese Fehlermeldung erscheint, fahren Sie wie folgt fort:

1. Stellen Sie sicher, ob der Drucker durch Drücken der **Einschalttaste**  für 2 Sekunden angestellt worden ist.
2. Drücken Sie auf dem easyTyp , um die Fehlermeldung zu entfernen.
3. Wenn das Druckersymbol in der oberen rechten Bildschirmecke angezeigt wird, drücken Sie die Schaltfläche .

FRAGEN

Für weitere Informationen:

MEDICARE AG

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebshändler
Medicare AG

Hauptstrasse 51 CH-5024 Küttigen Tel.: +41 44 482 482 6 Fax: +41 44 482 74 88 Mail: info@medicareag.ch Web: www.medicareag.ch