

easyTone – Adapté à votre mode de dépistage

Audiométrie sur tablette avec résultats « Réussite » ou « À refaire »

Résultat « Réussite » ou « À refaire » rapide : le dépistage à la portée de tous

Accélérez votre flux de travail avec notre nouveau casque d'audiométrie easyTone. Son interface sur tablette intuitive et son utilisation facile permettent un dépistage de l'audition beaucoup plus rapide qu'avec les audiomètres conventionnels. easyTone affiche des résultats clairs (Réussite/À refaire) qui n'ont pas besoin d'être interprétés davantage.

Personnalisation du protocole – Le dépistage à votre façon

Il n'a jamais été aussi facile de créer des protocoles de dépistage adaptés à vos besoins individuels et conformes à vos directives de tests. L'assistant de configuration de protocole simple et rapide vous guide à travers les différents choix afin que vous puissiez sélectionner vos options. Créez un protocole de dépistage personnalisé et gagnez en précision et en cohérence.

Flux de dépistage guidé

L'easyTone a été conçu pour vous faire gagner du temps en vous fournissant un flux de dépistage guidé. L'appareil est actionné par seulement deux boutons: « Présenter le son » et « Enregistrer le résultat ». Tout le reste fonctionne automatiquement.

Gestion des données numérisées

Vous en avez assez de la paperasse et des heures de travail post-traitement? easyTone minimise la nécessité d'imprimer des listes et de transférer les résultats à la main. Il suffit d'exporter les résultats sous forme de PDF ou de les envoyer en pièce jointe par e-mail. Avec le logiciel Win / MacOS supplémentaire, vous pouvez transférer des listes de dépistage et des résultats facilement entre votre ordinateur et easyTone. Cela vous permet d'économiser du temps et des ressources et d'obtenir un bon rapport coût-efficacité.

Audiométrie tonale sons purs pour test avancés

L'easyTone offre deux méthodes de dépistage pour répondre aux besoins de votre programme de dépistage. L'une d'entre elles utilise une méthode de dépistage par balayage rapide. La seconde méthode permet de déterminer le seuil lorsqu'un niveau d'audition précis est nécessaire.

Casque d'audiométrie

Toute la puissance d'un audiomètre ultramoderne dans un casque pratique. Ce concept unique intègre un audiomètre IEC / ANSI Type 4 avec étalonnage, dans le casque circum-auriculaire à atténuation sonore. Un moniteur de bruit intégré garantit le respect des exigences de conformité en matière de bruit ambiant.

Aperçu des fonctionnalités

- Audiomètre ultramoderne sur tablette
- Casque avec audiomètre easyTone intégré
- Résultat Réussite / À refaire
- Transition facile entre le dépistage et la détermination du seuil
- Flux de travail guidé empêchant les erreurs de l'opérateur et permettant de gagner du temps
- Assistant de protocole pour une configuration facile
- Casque circum-aural offrant une excellente atténuation du bruit
- Surveillance du bruit ambiant
- Impression directe des résultats ou partage par e-mail
- Logiciel d'accompagnement pour la gestion des listes de dépistage



Données techniques

SPÉCIFICATIONS D'EASYTONE

Signaux de test	Sons purs et wobulés (continus et pulsés)
Fréquences de test	125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz
Pas de niveau	5 dB
Plage d'audition en con- duction aérienne (CA)	-10 dB HL à 100 dB HL
Langues	Français, anglais, allemand, coréen, espagnol, hongrois, polonais, turc
Mode de dépistage	Liste de dépistage et dépistage individuel

CASQUE D'AUDIOMÉTRIE EASYTONE

Dimensions	L x P x H: 19,1 cm x 9,3 cm x 13,4 cm
Poids	389 g
Alimentation	par USB
Sortie	USB-C
Entrée	Poire de réponse patient
Moniteur de bruit	Microphone intégré

SPÉCIFICATIONS DE LA TABLETTE

Résolution	2000 x 1200 pixels
Ecran	10,6 pouces
Système d'exploitation	Android™
Version	12
Entrée	USB-C

COMPOSANTS STANDARD

- Casque d'audiométrie easyTone
- Tablette Android™
- Housse de tablette
- Application easyTone
- Logiciel d'accompagnement easyTone
- Alimentation

ACCESSOIRES EN OPTION

- Poire réponse patient
- Mallette de transport
- Splitter USB-C

NORMES

Audiomètre	IEC 60645-1, Type 4
Sécurité	CEI 60601-1, Type B
EMC	CEI 60601-1-2
CE 0123	Conformément au règlement (UE) 2017/745, Classe IIa

Les spécifications sont susceptibles d'évoluer sans préavis.

Composants standard



Casque
d'audiométrie
easyTone



Tablette
Android™
avec housse



Application
easyTone



Logiciel
d'accompagnement
easyTone

Composants en option



Poire réponse
patient



Mallette de
transport



Splitter USB-C

MAICO Diagnostics GmbH

Sickingenstr. 70-71 · 10553 Berlin · Allemagne
Tel.: +49 30/70 71 46-50 · Fax: +49 30/70 71 46-99
sales@maico.biz · www.maico.biz

MEDICARE AG

Hauptstrasse 51 CH-5024 Küttigen
Tel.: +41 44 482 482 6 Fax: +41 44 482 74 88
info@medicareag.ch www.medicareag.ch

