


Gesundheitsüberwachung

Eine medizinische 5-in-1- Lösung für  jeden Haushalt!

Mit dem QluPod können Sie Ihre Vitalwerte mühelos messen, folgen und überwachen.



EKG

Mit Hilfe eines Elektrokardiogramms (EKG) kann der Herzrhythmus und die Aktivität des Herzens auf einfache Weise sicher und zuverlässig überprüft werden.

Herzfrequenz

Mit der Herzfrequenzfunktion des QluPods erhalten Sie eine präzise Messung von Puls und Herzrhythmus, die Ihnen wertvolle Einblicke in Ihre Herz-Kreislauf-Gesundheit bieten.

Körpertemperatur

Unser QluPod misst die Temperatur der Haut, indem er die elektrischen Eigenschaften spezieller Sensormaterialien nutzt, um Temperaturänderungen zu erkennen.

Blutdruck

Der QluPod wird an einer kompakten Manschette befestigt, mit der App verbunden und mit nur einem Klick beginnt die Messung Ihrer Blutdruckwerte auf und liefert Ihnen zuverlässige Ergebnisse.


Blutsauerstoff

Das Pulsoximeter arbeitet nach dem bewährten Reflexionsverfahren. Einfach den Finger auf den oberen Sensor des QluPods legen und Sie erhalten präzise Werte Ihres Sauerstoffgehalts.



Verbinden Sie Ihren QluPod mit unserer QluApp und starten Sie mit dem Messen Ihrer Vitalwerte. Mit der QluApp haben Sie Ihre Gesundheit stets im Überblick.

Unsere QluApp ist sowohl im App Store als auch im Google Play Store verfügbar. Ganz gleich, ob Sie Ihre Vitalwerte messen oder eine Vielzahl von Funktionen erkunden möchten, mit der QluApp haben Sie viele nützliche Möglichkeiten zur Unterstützung Ihrer Gesundheit. Wählen Sie zwischen unserer kostenlosen Version oder erweitern Sie auf das Pro- Abonnement für noch mehr Möglichkeiten und Einblicke! Wie zum Beispiel das Teilen Ihrer Vitalwerte mit einer Begleitperson.

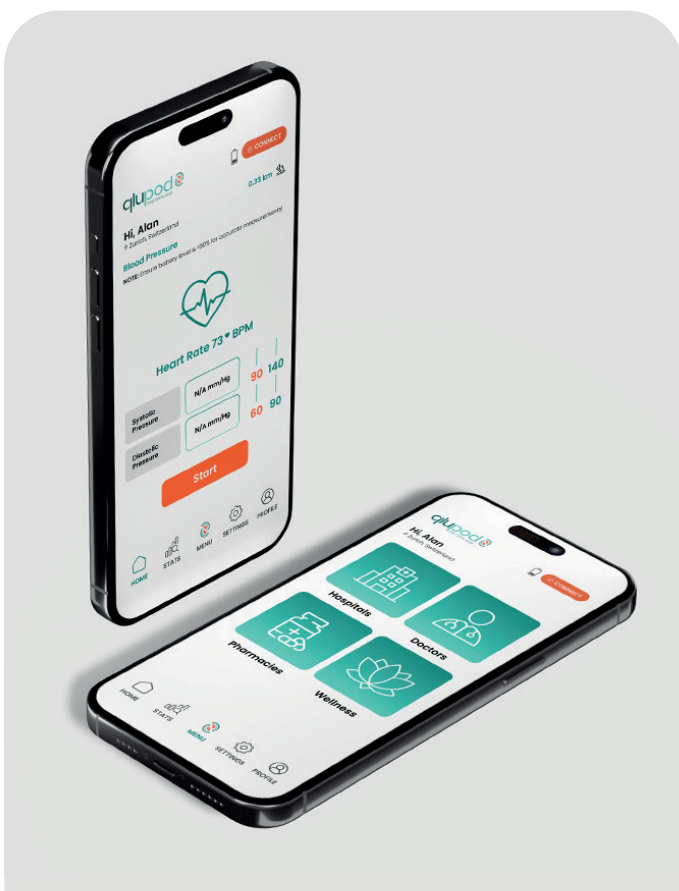



Einfach anklicken und genaue Blutdruckwerte erhalten.

Mit dem QluPod können Sie den Blutdruck mühelos und präzise mit der Armmanschette messen. Den QluPod bis zum «klick» an die Armmanschette drücken und über die App starten. Das Gerät verfügt über eine automatische Druckaufbau- und Luftablassfunktion, weshalb die Manschette bei jeder Messung ein optimales Druckniveau erzeugt. Ist dieses optimal, wird langsam die Luft abgelassen und dadurch eine zuverlässige Messung gewährleistet.

Inhalt dieser Verpackung

- 1x QluPod
- 1x Blutdruck Armmanschette
- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Geräte-Karte
- 1x USB-A-Kabel



Technische Daten:

- Medizinisches Gerät der Klasse 2A
- Jederzeit Zugriff auf die Vitaldaten über die App
- Ein Gerät kann mehrere App-Nutzer haben
- 7 Tage Datenspeicherung mit der kostenlosen App
- Produktmasse (LxBxH): 182mm x 131mm x 65mm
- Produktgewicht: ca. 485g
- Stromversorgung: USB-Ladeanschluss
- Masse der Armmanschette (LxH): 550mm x 105-150mm
- EAN Nr: 6974364650628



Unterstützend. Präzise. Informativ. Mobil.



Bahnhofstrasse 23
9100 Herisau
Switzerland

E-mail: office@qilupod.com
Phone: +41 (0) 71 510 05 45
www.qilupod.com

Entdecken Sie
mehr über QluPod
auf Instagram

