

1 INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA RAPIDA




Con questa Guida rapida non si intende sostituire il manuale d'uso. La lettura dell'intero manuale d'uso prima dell'utilizzo del dispositivo è obbligatoria!

Alcune delle seguenti funzioni possono variare a seconda delle impostazioni personalizzate.

2 DESCRIZIONE

I modelli MA 25 / MA 25e / MA 27 / MA 27e sono audiometri per via aerea a tono puro. I modelli MA 25e e MA 27e estendono le funzionalità del modello MA 25 / MA 27 con il test automatico della soglia dell'udito Hughson-Westlake, la funzione di parlato in avanti e il trasferimento dei risultati al PC.

3 FUNZIONE DEI PULSANTI

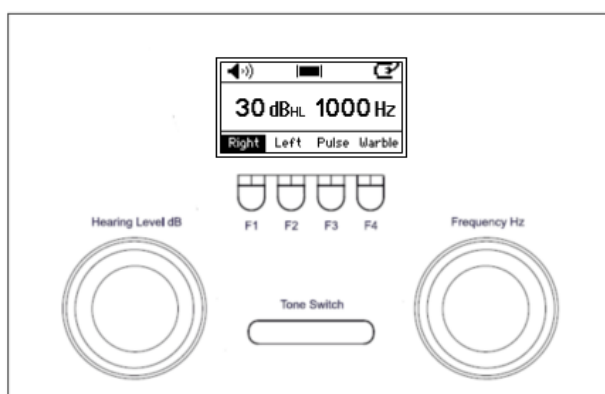

Nome(i) / Funzione(i)	Descrizione
Accensione	Premere il pulsante di Tone Switch (presentazione del tono) . Attenzione: Il dispositivo può essere acceso soltanto se le cuffie sono collegate correttamente!
Spegnimento	Premere la manopola del Hearing Level dB (Livello uditivo in dB) e la manopola della Frequency Hz (Frequenza in Hz) .
Pulsante di presentazione del tono	Sfiorare per trasmettere il segnale. Sulla schermata verrà visualizzato un pittogramma di trasmissione del tono (per es. ).
Livello uditivo in dB	Ruotare per selezionare il livello uditivo del tono trasmesso.
Frequenza Hz	Ruotare per selezionare la frequenza del tono trasmesso.


Tasti funzione MA 25 / MA 27

F1	F2	F3	F4
Selezionare orecchio Destro	Selezionare orecchio Sinistro	Pulsato On/Off	Warble On/Off

Tasti funzione MA 25e / MA 27e

F1	F2	F3	F4
Alternare tra Destro e Sinistro	Memorizza soglia valore	Pulsato On/Off	Warble On/Off

4 VISUALIZZAZIONE

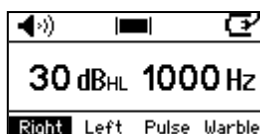

Il tono è trasmesso (acceso).



Il tono non è trasmesso (spento).



Il pulsante di risposta del paziente è stato attivato (premuto).



Il pulsante di risposta del paziente non è stato attivato (non premuto).



Il dispositivo è collegato ad una fonte di alimentazione.



Quando il dispositivo è alimentato da batterie, l'icona delle batterie cambia in funzione del livello di carica della batteria.



Quando le batterie stanno per scaricarsi, sullo schermo viene visualizzata la scritta lampeggiante **Low Battery (batteria scarica)**.

5 MENU DI CONFIGURAZIONE

Per accedere al menu di configurazione, premere F1 ed F4 contemporaneamente per 2-3 secondi.

F1	F2	F3	F4
Modifica Impostazione	Scorrere verso l'alto (↑) nel menu di configurazione	Scorrere verso il basso (↓) nel menu di configurazione	Salva le impostazioni ed esci dal menu di configurazione

6 FUNZIONI SPECIALI DI MA 25e / MA 27e

- Talk FW (Microfono dell'esaminatore):** Tenere premuta la manopola del **Livello uditivo in dB** per attivare il microfono operatore. Per regolare il livello del microfono operatore, tenere premuto e ruotare la manopola del **Livello uditivo in dB**.

Premere il selettore di frequenza per attivare questo menu.



- Tasti funzione speciale MA 25e / MA 27e:**

F1	F2	F3	F4
Elimina tutte le soglie uditive memorizzate nel dispositivo	Memorizza un livello soglia Not Heard (Non sentito)	Visualizza tutte le soglie uditive memorizzate nel dispositivo	Avvia il test automatico Hughson-Westlake (HW)

- Trasferimento a PC:** Il trasferimento dei dati ad un PC richiede **MAICO Sessions**. Rivedere il manuale di funzionamento per l'installazione corretta e le istruzioni di trasferimento.