

Breve descrizione delle funzioni per la tastiera standard per PC e il mouse per PC

F1 = non occupato
 F2 = Commutazione suono/voce (solo voce MA 33)
 F3 = Commutazione sinistra/destra
 F4 = Rumore di occlusione del canale destro On/Off

F5 = Linea dell'aria
 F6 = Conduzione ossea (KL, solo versione SISI)
 F7 = non occupato
 F8 = tono impulsi on/off

F9 = Rumore di occlusione canale sinistro On/Off
 F10 = non occupato
 F11 = UCL + MCL (interruttore)
 F12 = Funzionamento dell'interruttore/generatore di toni



TAB = Commutazione destra/sinistra

Ctrl = Interruttore/Generatore di toni - destra

R = orecchio destro
 L = linkes Ohr
 B = ambiguo (se attivato)


Alt + B = Programm beenden
 Alt + E = Imposta Alt
 + R = Lavorazione Alt
 + T = Test dello schermo
 Alt + U = Segni insicuri
 Soglia

MAICO Diagnostics GmbH
 Sickingerstr. 70-71
 10553 Berlino
 Telefono: 030 / 70 71 46-20, Fax-99
 E-mail: vertrieb@maico.biz Internet:
 www.maico.biz

Barra spaziatrice = Interruttore/Generatore di toni della pagina attiva
 Alt + L = Elimina misurazione (GDT&MAICO)
 Alt + N = Neu (NOAH)
 Alt + D = misurazione del carico esistente
 Alt + S = Salva misurazione

Memorizza l'attuale Lettura

Interruttore/Generatore di toni
 Selezione del livello e della frequenza

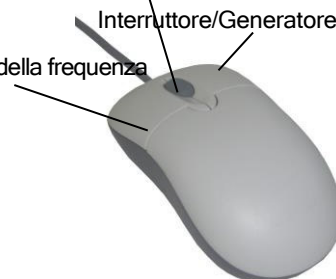

Pressione = espressione istantanea

? = segna una soglia uditiva incerta
 Cambio di livello contro-orecchio

Pos1 = Salta indietro a 1 kHz

Cambio di livello contro-orecchio
 Del = cancella l'ultimo valore misurato

Tubo di misura della variazione di livello

SISI - Test (versione nur SISI)
 S = Stopp (Giocatore)
 P = Inizio (Giocatore)
 E = Ende (nur SISI-Test)

Commutazione di frequenza

I valori misurati assumono N = non uditi
 Ctrl = Interruttore/Generatore di toni sinistro